

Fiche produit : Lingettes désinfectantes multisurfaces sans alcool

Cleanmed Wipes AF



Alcohol Free Disinfectant Wipes for the surface disinfection of medical devices, including alcohol-sensitive surfaces.

Indications: CLEANMED WIPES AF has been specially formulated for use in the Medical and Dental environment. Its effectiveness is tested against a wide spectrum of organisms (see table). Tub contains wipes in poly-sealed bags.

Wipes size: 200x200 mm.
Available in Lemon and Natural fragrances.

Directions for Use: Using a new wipe for each application wipe objects to be disinfected so that they are completely moistened and let the disinfectant take action over 30 seconds, allowing surface moisture to evaporate.

Composition: Aqua, Benzalkonium Chloride, C12-14 Alkyl Ethylbenzylammonium Chloride, Didecylidimethylammonium Chloride, Isopropyl Alcohol, C9-11 Pareth-8, Peracetic acid, PPG-2 Methyl Ether, Polyaminopropyl-Biguanide, Cocamidopropyl Betaine, Tetrasodium EDTA.

Tested to Standards: EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624, EN 13704

Lingettes désinfectantes sans alcool pour les surfaces des dispositifs médicaux, y compris les surfaces sensibles à l'alcool.

Effective Spectrum Spectre d'activité:	Contact Times Temps de Contact
Bactericidal - Bactéricide:	
Pseudomonas aeruginosa	30 sec
Enterococcus hirae	30 sec
Staphylococcus aureus	30 sec
Salmonella typhimurium	60 sec
MRSA	60 sec
VRE	60 sec
E-Coli	60 sec
Clostridium Difficile (C-Diff)	2 min
Microbacteria	2 min
Mycobacterium avium	2 min
Yeasticidal - Levuricide:	
Candida albicans	30 sec
Virucidal - Virucide:	
Hepatitis C virus (HCV)	5 min
Human Immunodeficiency Virus (HIV)	30 sec
Human Influenza B Virus	30 sec
H1N1 Influenza A	2 min
Rotavirus A	30 sec
Fungicidal - Fongicide:	
Aspergillus niger	30 sec
Penicillium chrysogenum	2 min

Indications: CLEANMED WIPES AF : Spécialement formulées pour une utilisation en milieu médical et dentaire. Son efficacité est testée contre un large spectre d'organismes (voir tableau). Boîte distributrice de 200 lingettes en sachet scellé.

Dimensions de la lingette: 200x200 mm
Parfums: citron, naturel.

Utilisation: Utilisez une serviette propre pour chaque objet à désinfecter de sorte qu'il est complètement mouillé. Laisser agir pendant 30 secondes de façon à permettre l'évaporation.

Composition: Aqua, Chlorure de benzalkonium, C12-14 Chlorure d'éthylbenzylammonium alkyle, Chlorure de didécylidiméthylammonium, Alcool isopropylique, C9-11 Pareth-8, Acide peracétique, PPG-2 éther méthylique, Polyaminopropyl-biguanide, Cocamidopropyl bêtaïne, Tetrasodium EDTA.

Testé aux normes: EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624, EN 13704

Code Code article	Item Description Description du produit	Packaging Conditionnement
7.004AF-D	Cleanmed Wipes Af Dispenser - Tub of 200 Wipes	12 Tubs / Box
	Cleanmed Wipes Af Dispenser - Boîte distributrice de 200 lingettes	12 Boîtes / Carton
7.004AF-R	Cleanmed Wipes Af Refill - Refill pack of 200 Wipes	12 Refill pack / Box
	Cleanmed Wipes Af Refill - Sachet de 200 lingettes	12 Sachets / Carton